

Instrucțiune pentru utilizare Quixx® aloe

Pentru igiena zilnică a nasului și menținerea funcțiilor nazale fiziologice

Nasul este poarta către căile respiratorii, el asigurând protecția plămânilor noștri. Mucoasa nazală, atunci când este intactă și hidratată în mod optim, filtrează, umidifică și încălzește aerul rece pînă la temperatura corpului.

Cu toate acestea, aerul poluat, rece și/sau uscat (precum este cel din încăperile supraîncălzite sau cele dotate cu aer condiționat, din mașină, tren sau avion) deseori provoacă uscarea și iritarea mucoasei nazale, afectîndu-i funcțiile.

Quixx® aloe este un remediu natural cu efect calmant asupra mucoasei nazale sensibile, ajutînd la menținerea hidratării sale pentru o filtrare și umidificare optimă a aerului. Aceasta contribuie la menținerea sănătății sistemului respirator.

Ce reprezintă și ce conține Quixx® aloe

Quixx® aloe este un spray nazal natural, izotonic, ce conține apă de mare din Oceanul Atlantic cu mineralele și oligoelemente prețioase, precum și extract de Aloe vera.

Concentrația sării din Quixx® aloe este adaptată la nivelele naturale ale organismului și, prin urmare, este delicată cu nasul dvs.

Fiecare 100 ml de Quixx® aloe conțin 28,6 ml de apă din Oceanul Atlantic, 71,4 ml de apă purificată și 0,05 g de extract de Aloe vera.

Pentru ce este utilizat Quixx® aloe?

- Igiena zilnică și curățarea nasului
- Ca adjuvant în prevenirea simptomelor nazale ale răcelii
- Ameliorarea uscăciunii, iritației sau inflamației mucoase nazale
- Ca adjuvant în tratamentul rinitelor și sinuzitelor
- Ajutor pentru copiii ce nu-și pot încă sufla nasul

Care este mecanismul de acțiune al Quixx® aloe?

- Quixx® aloe curăță nasul:

Acesta înmoaie mucusul acumulat, ușurînd înlăturarea acestuia. Quixx® aloe elimină alergenii și agenții patogeni, reducînd timpul de expunere la ei al mucoasei nazale.

- Quixx® aloe hidratează mucoasa nazală și ameliorează starea ei:

Apa din Oceanul Atlantic care se conține în Quixx® aloe, hidratează mucoasa nazală, susținînd funcția sa fiziologică de filtrare. Aloe vera intensifică acțiunea hidratantă a apei saline și ajută la calmarea și ameliorarea iritației mucoasei nazale.

Quixx® aloe oferă următoarele avantaje:

- Conține doar componente naturale
- Nu conține conservanți
- Nu provoacă dependență
- Este inofensiv în utilizarea de lungă durată

Astfel, Quixx® aloe susține funcțiile de protecție ale nasului și ajută la menținerea sănătății lui.

Cine poate utiliza Quixx® aloe?

Adulții, copiii și sugarii de la 6 luni.

Quixx® aloe poate fi de asemenea utilizat pe parcursul sarcinii și în perioada de alăptare.

Utilizarea Quixx® aloe

Cît de des și în ce cantități trebuie utilizat Quixx® aloe?

Sugari (de la 6 luni) și copii cu vîrsta pînă la 6 ani:

1 puf în fiecare nară pînă la 4 ori pe zi.

Copii cu vîrsta peste 6 ani și adulți:

1-3 pufuri în fiecare nară de cîteva ori pe zi, în funcție de necesitate.

Cum trebuie utilizat Quixx® aloe?

Scoateți capacul protector. Înainte de prima utilizare, "încărcați" pompa, pulverizînd de cîteva ori în aer pînă la producerea unei cețe fine (Fig. 1). Acum spray-ul este gata pentru utilizare:

Introduceți vîrfurile aplicatorului în nară și apăsați pe manșon din ambele părți (Fig. 2). După fiecare utilizare, curățați aplicatorul și puneți la loc capacul protector.

Aplicatorul flaconului produce un jet dozat care se dispersează uniform, hidratînd și curățînd mucoasa nazală.



Fig. 1



Fig. 2

Care este durata de administrare a Quixx® aloe?

Nu există restricții în privința duratei de utilizare. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați farmacistului dvs.

În ce cazuri nu trebuie utilizat Quixx® aloe?

Nu utilizați Quixx® aloe dacă suferiți de hipersensibilitate (alergie) la apa de mare sau la Aloe vera.

Reacții adverse posibile

La momentul dat, nu se cunosc reacții adverse.

Cum trebuie păstrat Quixx® aloe

- A se păstra la temperatura camerei.
- A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Descrierea ambalajului

Quixx® aloe este disponibil în flacoane a câte 30 ml de soluție. Fiecare flacon produce aproximativ 220 de pufuri. Flaconul conține un sistem antibacterian încorporat în pompă, ce previne pătrunderea microorganismelor în interior pe tot parcursul perioadei de utilizare.

Nu utilizați Quixx® aloe după expirarea termenului de utilizare, indicat pe ambalaj după simbolul *Simbol clepsidră EN 980*.

Nu utilizați Quixx® aloe mai mult de 6 luni de la deschiderea flaconului.

Producător:
PHARMASTER
ZI de Krafft
67150 Erstein
Franța

Distribuitor:
BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP)
Glienicke Weg 125
12489 Berlin
Germania

Semnul CE

Ultima dată revizuit pe 10/2011