

# Instrucțiuni de utilizare

## QUIXX® daily

### **Spray nazal cu apă de mare izotonică pentru curățare și hidratare nazală**

QUIXX® daily este un spray nazal pentru irigare, non-medicamentos, steril și fără miros, care ajută la ameliorarea congestiei nazale asociată sinuzitei, nasului înfundat, febrei fânului și alergiilor, precum și pentru îngrijirea postoperatorie a nasului. Concentrația de sare a acestuia este adaptată la nivelurile naturale ale organismului (0,9%) și, din acest motiv, este delicat pentru nasul dumneavoastră, nu usucă, nu afectează și nu modifică mucoasa nazală.

**QUIXX® daily conține:** apă de mare naturală (diluată la nivel fiziologic (0,9%) cu apă purificată)

### **Ce face QUIXX® daily pentru a vă îmbunătăți respirația**

- Înmoaie mucusul și astfel, permite eliminarea secrețiilor nazale, de exemplu, în răceli și alergii.
- Ameliorează simptomele locale ale infecțiilor căilor respiratorii superioare (ICRS), precum și cele ale rinosinuzitelor acute și cronice.
- Curăță activ și bine nasul, reducând bacteriile, virusurile, alergenii și polenul, crustele, praful și mucusul în exces.
- Are un efect hidratant și calmează iritația.

### **De asemenea, QUIXX® daily are următoarele avantaje**

- Formulă non-medicamentoasă, nu creează dependență, poate fi utilizat pe termen lung
- Flaconul poate fi păstrat în poziție orizontală fără a curge
- Poate fi utilizat până la ultima picătură (nu rămâne nimic în flacon)
- Nu conține gaz propulsor inflamabil, conservanți, este steril

### **Cine poate utiliza QUIXX® daily**

Adulți, copii cu vârsta peste 2 ani.

De asemenea, QUIXX® daily poate fi utilizat și în timpul sarcinii și al alăptării.

### **Cum se utilizează QUIXX® daily**

Respectați întotdeauna instrucțiunile de utilizare a QUIXX® daily. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Se recomandă ca produsul să fie utilizat după cum urmează:

Aplicați Quixx® daily până la de 5 ori pe zi, în cazul în care congestia sau uscăciunea căilor nazale persistă.

1. Curățați nasul de secreții, dacă este cazul.
2. Scoateți capacul aplicatorului.
3. Puteți ține flaconul în orice unghi și introduceți vârful aplicatorului ușor în nară.
4. Înclinați ușor capul spre partea opusă nării în care doriți să pulverizați.
5. Apăsați pulverizatorul timp de 1-2 secunde.
6. Pulverizați pe rând în fiecare nară.
7. După fiecare utilizare, spălați și uscați aplicatorul și puneți la loc capacul.
8. Pentru curățarea nasului, este recomandat să folosiți produsul deasupra unei chiuvete sau a unui vas.

Din motive de igienă și pentru a evita contaminarea încrucișată între utilizatori, flaconul trebuie folosit numai de o singură persoană.



### **Contraindicații**

Hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre componentele produsului.

### **Atenție**

Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.

- A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
- Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.
- A se proteja de lumina solară.
- Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C/122°F.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

### **Precauții**

- Utilizarea acestui dispozitiv de către mai multe persoane poate transmite infecții, curățați aplicatorul în apă cu săpun și clătiți cu apă caldă după fiecare utilizare.

## **Dispozitiv medical care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală**

### **Perioada de valabilitate**

36 luni.

Produsul trebuie utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Datorită tehnologiei speciale cu valvă bag-on, soluția se menține sterilă până la epuizarea ultimei picături.

Nu utilizați după expirarea perioadei de valabilitate.

### **Condiții de păstrare**

A se păstra la temperaturi între 15°C - 30°C

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

### **Mărime de ambalaj**

100 ml

[Symbol 5.1.1 manufacturer DIN EN ISO 15223-1:2012]

### **Producător**

AURENA LABORATORIES AB, Fjärrviksvägen 22, SE-65350 Karlstad, Suedia

[CE sign] 0413

### **Distribuitor**

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicke Weg 125, 12489 Berlin, Germania

### **Data revizuirii textului**

Februarie 2017

[Symbol 5.2.4 sterile using irradiation DIN EN ISO 15223-1:2012]

[REF 1010-4]

[Ver: YYYY-MM-DD]

[Symbol 5.1.5 LOT DIN EN ISO 15223-1:2012]

[Symbol 5.1.4 sand glass DIN EN ISO 15223-1:2012]

Vezi partea de jos a flaconului/cutiei

[Symbols of language code with each version according to ISO-639-1]