

QUIXX® soft

Pentru igiena cotidiană și păstrarea unor funcții nazale sănătoase

Nasul reprezintă poarta către căile noastre respiratorii și ne protejează plămâni. Mucoasa nazală, când este intactă și optim hidratată, filtrează și umidifică aerul și încălzește aerul rece aducându-l la temperatura organismului.

Cu toate acestea, aerul poluat, rece și/sau uscat (precum acela din încăperi încălzite sau cu aer condiționat, din automobile, trenuri sau avioane) provoacă frecvent uscare și iritarea mucoasei nazale afectându-i astfel funcția.

Quixx soft este un ajutor natural în calmarea unei mucoase nazale sensibile, contribuind la păstrarea hidratării acesteia, filtrând și umidificând corect aerul. Acest fapt contribuie la menținerea sănătății sistemului respirator.

Ce este și ce conține Quixx soft

Quixx soft este un spray nazal natural, izotonic care conține apă de mare din Oceanul Atlantic cu minerale valoroase și oligoelemente cu adaos de extract de Aloe vera.

Concentrația de sare din Quixx soft este adaptată la nivelurile naturale ale organismului și, din acest motiv, este delicat pentru nasul dumneavoastră.

Fiecare 100 ml de Quixx soft conține 28,6 ml de apă din Oceanul Atlantic, 71,4 ml de apă purificată și 0,05 g de extract de Aloe vera.

Pentru ce se folosește Quixx soft?

- Îngrijire și curățare nazală zilnică
- Ca măsură de susținere în prevenirea simptomelor nazale în răcelile obișnuite
- Ameliorarea mucoasei nazale uscate, iritate sau inflamate
- Tratament de susținere în rinită și sinuzită
- Ajutor pentru copiii care nu își pot sufla nasul

Cum acționează Quixx soft?

- Quixx soft curăță nasul: Înmoaie mucusul acumulat, ușurând astfel înlăturarea acestuia. Spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală.
- Quixx soft hidratează și ajută mucoasa nazală:

Apa din Oceanul Atlantic conținută de Quixx soft hidratează mucoasa nazală, susținând funcția de filtrare a acesteia. Suplimentar, Aloe vera îmbunătățește acțiunea de hidratare a apei sărate și contribuie la calmarea și ameliorarea mucoasei nazale iritate.

De asemenea, Quixx soft are următoarele avantaje:

- Conține numai ingrediente naturale
- Nu conține conservanți
- Nu creează dependență
- Sigur în utilizare pe termen lung

Quixx® soft

V-No.:	V119992/01	TW-No.:	102872	BC-No.:	18-2787	Approved for printing:		
Package:	N/A	Language:	Romanian					
Size:	160 x 180 mm	Weight:	N/A					
Printing colours:	1. Pantone 282	Braille transcrip.:	N/A					
Font size:	9,5 pt	Group:	N/A	RUT:	N/A		RD-Code:	N/A
Add. Info:	N/A	Date:	25.07.18	Richter				

Prin urmare, Quixx soft susține funcțiile de protecție ale nasului și contribuie la menținerea sănătății nasului dumneavoastră.

Cine poate folosi Quixx soft?

Adulți, copiii și sugari cu vârsta de peste 6 luni.

De asemenea, Quixx soft poate fi folosit în perioada de sarcină și de alăptare.

Utilizarea Quixx soft

De câte ori și cât Quixx soft trebuie folosit?

Sugari (peste 6 luni) și copii până la 6 ani:
1 pulverizare în fiecare nară, de maximum 4 ori pe zi.

Copii de peste 6 ani și adulți:

1-3 pulverizări în fiecare nară de mai multe ori pe zi, la nevoie.

Cum trebuie utilizat Quixx soft?

Îndepărtați capacul. „Pregătiți” flaconul pompând de câteva ori până la obținerea unei pulverizări fine (Fig. 1). Acum, spray-ul este pregătit de utilizare:

Introduceți aplicatorul în nară și apăsați pe oricare parte a manșonului acestuia (Fig. 2). După fiecare utilizare, curățați aplicatorul și puneți la loc capacul.

Pulverizatorul eliberează un jet dozat, care se dispersează uniform, hidratând și curățând în același timp mucoasa nazală.

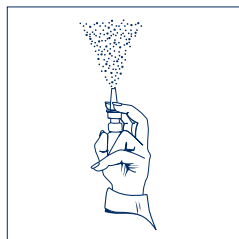


Fig. 1



Fig. 2

Cât timp poate fi utilizat Quixx soft?

Nu există restricții cu privire la durata de folosire. În cazul în care aveți nelămuriri, vă rugăm să consultați farmacistul.

Când nu trebuie utilizat Quixx soft?

Nu folosiți Quixx soft în cazul în care sunteți hipersensibil (alergic) la apa de mare sau la Aloe vera.

Reacții adverse posibile


Până în prezent, nu sunt cunoscute reacții adverse.

Cum trebuie păstrat Quixx soft

- A se păstra la temperatura camerei.
- A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Descrierea ambalajului

Quixx soft se livrează în flacoane a 30 ml soluție. Fiecare flacon eliberează aproximativ 220 de pulverizări. Flaconul conține un sistem de pompare antibacterian integrat, care previne pătrunderea microbilor pe durata utilizării.

Nu folosiți Quixx soft după data expirării inscripționate pe ambalaj după simbolul . Folosiți Quixx soft în termen de 6 luni de la deschiderea flaconului.

Fabricant:

PHARMASTER

ZI de Krafft, 67150 Erstein, Franța



Distribuit de către:

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Glienicker Weg 125

12489 Berlin, Germania

Data ultimei actualizări 10/2011

RO / 203 / V119992/01 / NOT22325V03

Quixx® soft



V-No.:	V119992/01	TW-No.:	102872	BC-No.:	18-2787	Approved for printing:		
Package:	N/A	Language:	Romanian					
Size:	160 x 180 mm	Weight:	N/A					
Printing colours:	1. Pantone 282	Braille transcrip.:	N/A					
Font size:	9,5 pt	Group:	N/A	RUT:	N/A		RD-Code:	N/A
Add. Info:	N/A	Date:	25.07.18	Richter				