

QUIXX[®] extra

Pentru decongestionarea nasului dumneavoastră și o senzație de prospețime

Nasul reprezintă poarta către căile noastre respiratorii și ne protejează plămânii. Un nas sănătos filtrează, umidifică și încălzește aerul înainte ca acesta să pătrundă în organismul nostru. În răceală și gripă, însoțită de congestie nazală sau de curgerea nasului, funcțiile nazale sunt afectate. De asemenea, congestia nazală prelungită și prezența mucusului acumulat în exces în cavitățile nazale cresc riscul complicațiilor (precum sinuzita, otita sau bronșita).

Quixx extra este un ajutor natural pentru cavitățile nazale congestionate și sinusurile blocate.

Ce este și ce conține Quixx extra

Quixx extra conține apă din Oceanul Atlantic cu minerale și oligoelemente valoroase și ulei de eucalipt.

Concentrația de sare din Quixx extra (echivalent la aprox. 2,6 % NaCl) este mai ridicată decât cea a mucoasei nazale (soluție salină hipertonică), creând astfel o presiune osmotică ce contribuie la decongestionarea nasului.

Fiecare 100 ml Quixx extra conține apă din Oceanul Atlantic, apă purificată și ulei de eucalipt (0,015 ml la 100 ml).

Quixx extra se livrează într-un flacon a 30 ml soluție. Fiecare flacon eliberează aprox. 220 de pulverizări. Flaconul conține un sistem de pompare antibacterian integrat, care previne pătrunderea microbilor pe întreaga durată de utilizare.

Pentru ce se utilizează Quixx extra?

- Ameliorează congestia nazală și sinusala în răceală și gripă
- Curăță în mod activ căile nazale
- Are efect revigorant puternic

De asemenea, Quixx extra prezintă următoarele avantaje:

- Conține numai ingrediente naturale
- Nu conține conservanți
- Nu creează dependență

Cum acționează Quixx extra?

Quixx extra combină efectul de decongestionare cu senzația de prospețime.

Datorită concentrației de sare mai mari decât a mucoasei nazale, Quixx extra drenează lichidul în exces reducând inflamația și ameliorând astfel congestia nazală și sinusurile înfundate.

Prin înmuierea mucusului acumulat și a crustelor uscate, Quixx extra ușurează suflarea nasului.

Oulei de eucalipt revigorant creează senzația de nas și sinusuri curate și „desfundate” pentru o respirație mai ușoară.

Cine poate utiliza Quixx extra?

Adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani

Utilizarea Quixx extra

De câte ori și cât Quixx extra trebuie folosit?

Adulți și adolescenți:

1 – 3 pulverizări în fiecare nară de la 2 până la 3 ori pe zi

Copii cu vârsta peste 6 ani:

1 - 2 pulverizări în fiecare nară de la 2 până la 3 ori pe zi

A se agita înainte de utilizare.

Cum trebuie utilizat Quixx extra?

Îndepărtați capacul. „Pregătiți” flaconul pompând de câteva ori până când se produce o pulverizare fină (Fig. 1). Acum, spray-ul este gata de utilizare.

Introduceți aplicatorul în nară și apăsați pe oricare parte a gulerului acestuia (Fig. 2). După fiecare utilizare, curățați aplicatorul și puneți la loc capacul.

Pulverizatorul eliberează un jet dozat, care se dispersează uniform.

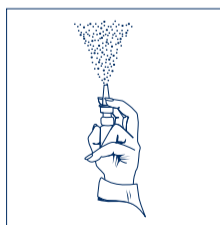


Fig. 1

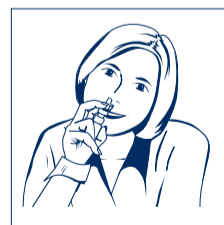


Fig. 2

Quixx[®] extra

V-No.:	V122098/01	TW-No.:	109359	BC-No.:	18-4060	Approved for printing:	
Package:	N/A	Language:	Romanian				
Size:	160 x 300 mm	Weight:	N/A				
Printing colours:	1. Pantone 282	Braille transcrip.:	N/A				
Font size:	9,5 pt	Group:	N/A	RUT:	N/A		RD-Code: N/A
Add. Info:	N/A	Date:	26.10.18	Richter			

Cât timp poate fi utilizat Quixx extra?

Consultați medicul sau farmacistul în legătură cu durata de utilizare.

Când nu trebuie utilizat Quixx extra?

În caz de hipersensibilitate (alergie) la apa de mare sau la uleiul de eucalipt.

Quixx extra nu trebuie utilizat la copii mai mici de 6 ani.

Sarcina și alăptarea

Consultați medicul cu privire la utilizarea Quixx extra în timpul sarcinii și în perioada de alăptare.

Aveți grijă deosebită cu Quixx extra

După o intervenție chirurgicală la nas sau după lezarea acestuia, Quixx extra trebuie utilizat numai cu avizul sau după consultarea unui medic.

Reacții adverse posibile

Uleiul de eucalipt poate provoca reacții alergice (inclusiv dispnee) la pacienții cu predispoziție.

Este posibil ca la începutul utilizării să simțiți ușoare înțepături.

Cum trebuie păstrat Quixx extra

- A se păstra la temperatura camerei.
- A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Nu folosiți Quixx extra după data de expirare inscripționată pe cutie după simbolul .

Nu folosiți Quixx extra mai mult de 6 luni de la data primei utilizări.

Quixx extra este disponibil fără prescripție medicală.

Fabricant:
Pharmaster
ZI de Krafft
67150 Erstein
Franța



Distribuit de:
BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Glienicke Weg 125
12489 Berlin
Germania

Data ultimei actualizări 02/2012

RO / 277 / V122098/01 / NOT23631V02

Quixx® extra



V-No.:	V122098/01	TW-No.:	109359	BC-No.:	18-4060	Approved for printing:		
Package:	N/A	Language:	Romanian					
Size:	160 x 300 mm	Weight:	N/A					
Printing colours:	1. Pantone 282	Braille transcrip.:	N/A					
Font size:	9,5 pt	Group:	N/A	RUT:	N/A		RD-Code:	N/A
Add. Info:	N/A	Date:	26.10.18	Richter				